

GlucoMen[®] areo Kratka uputa za uporabu

Kako izmjeriti razinu glukoze u krvi

1



Novu mjernu traku GlucoMen[®] areo umetnite gore u mjerac.

2



Pomoću lancetara dobijte krni uzorak.

3



Nanesite kapljicu krvi na kraj mjerne trake.

4



Poslije 5 sekundi pojavit će se rezultat mjerenja.

5



Pritisnite tipku za izbacivanje i na primjeren način odstranite mjernu traku.



 Division der
BERLIN-CHEMIE
ALMENARINI
diagnostica

Imate li pitanja ili prijedloge? Stojimo Vam na raspolaganju.
Besplatni telefon 0800 71 71
(od ponedjeljka do petka od 8-16 sati
www.glucomenareo.de | glucomen@berlin-chemie.de

GlucoMen[®]
areo

Jednostavno mjerenje

GlucoMen® areo informacije na zaslону

Priopćenje

Što znači informacija?

Što moram raditi?



Greška hardver sistema

Obratite se na besplatni broj korisničke podrške 0800 71 71



Mjerna traka testiranje je korištena ili je oštećena

Koristite novu mjernu traku



Greška krvnog uzorka

Nanesite krvni uzorak na novu mjernu traku



Mjerna traka je bila prerano odstranjena

Ponovite mjerenje sa novom mjernom trakom



NFC-veza prekinuta

Ponovite prijenos podataka



Imate li pitanja ili prijedloge? Stojimo Vam na raspolaganju.
Besplatni telefon 0800 71 71
(od ponedjeljka do petka od 8-16 sati
www.glucomenareo.de | glucomen@berlin-chemie.de

GlucoMen®
areo

Jednostavno mjerenje